

Универсальный настенный локтевой дозатор со сменной помпой MDS-1000 P



Универсальный настенный локтевой дозатор со сменной помпой MD 1000P

Универсальный настенный локтевой дозатор предназначен для подачи жидких кожных антисептиков, расфасованных в пластиковые флаконы объемом не более 1 л со стандартным диаметром горлышка 28 мм. Дозатор применяется в лечебно-профилактических учреждениях, роддомах, детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.) организациях общественного питания, на промышленных предприятиях, в том числе пищевых.

Технические данные:

1. Привод устройства - ручной. Объем выдаваемой порции жидкости 1,5 мл.
2. Масса устройства 0,5 кг.
3. Габаритные размеры: 412x212x95 **195 x 100 x 355**

Комплектность поставки.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Основной корпус - 1 шт. | 5. Дюбель - 3 шт. |
| 2. Установочная плата – 1 шт. | 6. Шуруп – 3 шт. |
| 3. Помповый насос – 2 шт. | 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт. |

4. Манжета крепления помпы – 1 шт.

Сборка и установка дозатора.

Закрепить помпу в основной корпус дозатора с помощью манжеты.

Крепление дозатора к стене осуществляется с помощью установочной платы.

Порядок работы.

1. Поместить трубку помпового насоса во флакон с антисептиком.
2. Установить флакон с антисептиком в основной корпус дозатора.
3. Нажмите несколько раз на локтевой рычаг дозатора до появления первой порции антисептика из носика.

Техническое обслуживание.

При необходимости дезинфицируйте наружные поверхности основного корпуса дозатора салфетками, смоченными любым дезинфицирующим средством, разрешенным для применения в этих целях на территории РФ.

По окончании дезинфекционной выдержки смойте дезинфицирующее средство с поверхностей салфетками, смоченными водой, затем осушите поверхности сухими чистыми салфетками.

Не используйте абразивные и хлорсодержащие средства для очистки поверхностей основного корпуса дозатора!